

Wann?	Was?	Wie?
-------	------	------

Morgens

2 min - 3 min

- | | |
|---|---|
| Instrumentenschläuche und wasserführenden Systeme | Wasserführende Instrumente im CleanHub ¹⁾ spülen (ohne Übertragungsinstrumente) |
| Mundglasfüller, Speischale | Mundglasfüller und Beckenspülung aktivieren (über automatisches Spülprogramm CleanHub) |
| Saugschläuche (innen) | Absaugen von Wasser |
| Flaschensystem (wenn vorhanden) | Mit Frischwasser befüllen (ggf. unter Zusatz von Flüssigkonzentrat zur Desinfektion (z.B. Alpron) |



Nach jeder Behandlung

- | | |
|--|---|
| Saugsystems und Mundspülbecken | Ein Glas Wasser über den Ablauf und das Saugsystem absaugen |
| Reinigung und Desinfektion der Geräteoberflächen (ohne Polster) | Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion (z.B. FD322/FD350/FD366) |
| Desinfektion des Polsters | Wischdesinfektion (z.B. FD312, FD366) |
| Desinfektion Instrumente | Wischdesinfektion (z.B. FD333, FD350) |

Abends

- | | |
|---|--|
| Reinigen und Desinfektion von Saugschläuchen (innen), Saugsystem und Mundspülbecken | Nichtschäumendes, materialverträgliches Desinfektionsmittel (z.B. Orotol Plus, Orotol ultra) |
| Saugschläuche aussen und Instrumentenschläuche aussen | Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion (z.B. FD322/FD350/FD366) |



Wöchentlich

- | | |
|--|---|
| Filtereinsätze in Speifontäne und Ablage | Filterdeckel entfernen, gelben Einwegfilter herausziehen und ausspülen, ggf. wechseln. Filter nicht in das Speibecken entleeren |
| Saugsystem/Saugschläuche (innen) | Nichtschäumendes, materialverträgliches Desinfektionsmittel (z.B. MD555 cleaner) |
| Speifontäne Anbauteile | Anbauteile (Becherfüller und Spülrohr) entfernen und reinigen, O-Ringe einfetten (320.3981.01)
Becherfüller und Spülrohr ggf. in Bilpron einlegen und entkeimen (Herstellerangaben beachten) |
| Flaschensystem (wenn vorhanden) | Wasserführende Instrumente mit Flüssigkonzentrat zur Entkeimung betreiben (ohne aufgesetzte Übertragungsinstrumente, z.B. Bilpron) |



Wöchentlich oder nach Bedarf

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Reinigung des Polsters | Manuelle Reinigung (z.B. FD360) |
| Reinigung der Flasche (innen) | Manuelle Reinigung (z.B. BC-San 100) |



⚠ Bitte verwenden sie nur von Mikrona empfohlene Desinfektionsmittel!
¹⁾ Empfehlung nach RKI-Richtlinie: 2 Min. Spülen ohne aufgesetztes Übertragungsinstrument.
 Der Pflege- und Reinigungsplan beinhaltet ausschliesslich die wesentlichen Bedienungsfunktionen. Sie ersetzt nicht die zum Lieferumfang gehörende Bedienungsanleitung.